

CLOVER 5

Lupa powiększająca

Instrukcja obsługi



Spis treści

Środki ostrożności	2
Wprowadzenie	3
Opis przycisków	3
Akcesoria.....	4
Bateria.....	5
Ładowanie baterii	5
Stan wskaźnika ładowania	6
Podstawka do pisania	6

Działanie	7
Typ sygnału	7
Kontrola sygnału	7
Powiększenie	7
Tryb koloru	7
Jasność	8
Dwa kolory	9
Zamrażanie	9
Podłączenie TV	9
Pamięć	10
Funkcja oszczędzania energii	10
Przywracanie ustawień fabrycznych	10
Rozwiązywanie problemów	10
Urządzenie nie włącza się	10
Biały / Czarny ekran	10
Obraz bez zmian	11
Smugi / Wypryski na ekranie	11
Specyfikacja	12



Środki ostrożności



Przed pierwszym użyciem lupy powiększającej CLOVER 5 należy Naładować w pełni baterię urządzenia. Patrz: sekcja ładowania akumulatora i więcej szczegółów.



Zawsze używaj urządzenie zgodnie z przeznaczeniem. Pamiętaj aby używać lupy w temperaturach pomiędzy 10°C i 35°C (50° - 95° F).



Przechowuj urządzenie z dala od wilgoci, deszczu oraz innych źródeł groźących jego zalaniem. Nie zanurzaj urządzenia w jakichkolwiek cieczach.



Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jakiegokolwiek nieautoryzowane ingerencje spowodują utratę gwarancji. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu obsługi.




Używaj tylko dołączonego zasilacza i akumulatora.




Wprowadzenie


Dziękujemy za zakup urządzenia CLOVER 5. Jest to przenośna, podręczna, lupa elektroniczna z panoramicznym 5' wyświetlaczem LCD. Zapewnia to ostre, wyraźne obrazy, które są dobrze widoczne w różnym stopniu powiększenia i trybach koloru. Urządzenie CLOVER 5 umożliwia powiększanie/pomniejszanie jak również zamrażanie uchwyconego obrazu. Posiada również zintegrowany i rozkładany stojak do pisania. Nadaje się idealnie do oglądania etykiet, książek, czasopism i innych.

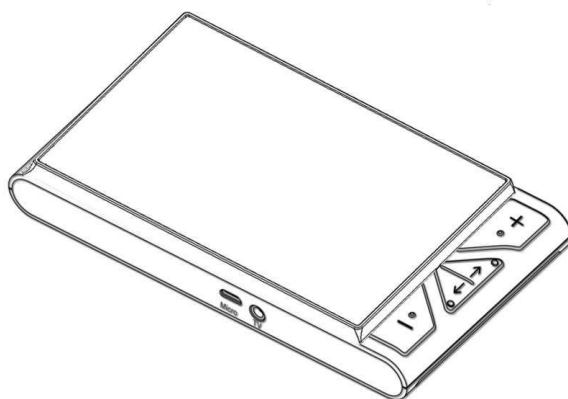


Opis przycisków

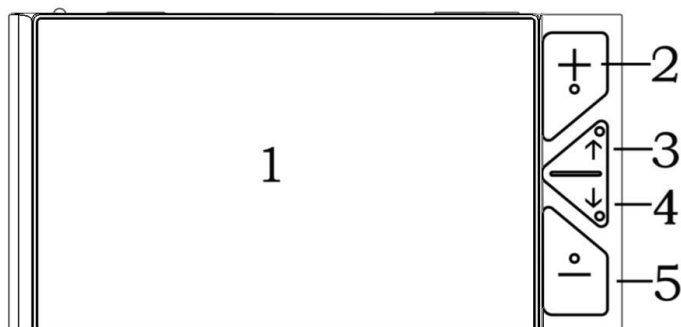


- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Ekran LCD | 2. Powiększanie |
| 3. Tryb koloru góra | 4. Tryb koloru dół |
| 5. Pomniejszanie | |

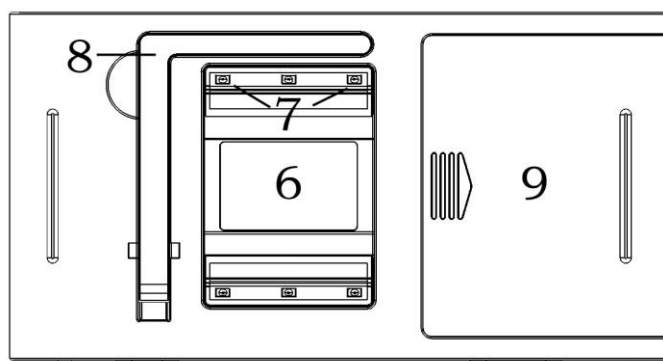

- | | |
|--------------|---------------|
| 6. Kamera | 7. Lampki LED |
| 8. Podstawka | 9. Bateria |

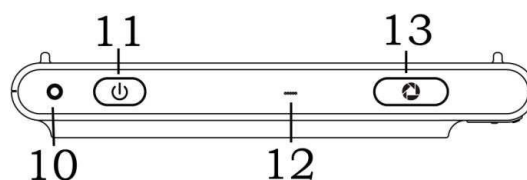

- | | |
|----------------------|------------------|
| 10. Lampka zasilania | 11. Włącz/wyłącz |
| 12. Brzęczyk | 13. Zamrażanie |

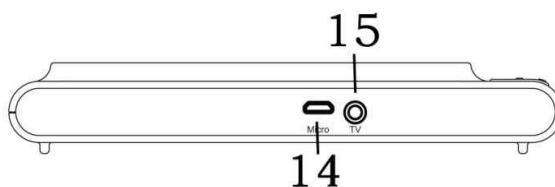

- | | |
|---------------|-------------|
| 14. Micro USB | 15. Port TV |
|---------------|-------------|

Akcesoria

W opakowaniu z urządzeniem CLOVER 5 znajdują się następujące elementy:



Instrukcja



Zasilacz




Ściereczka



Pokrowiec



Bateria

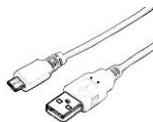


Kabel USB



Kabel TV

Bateria

1. Obróć urządzenie.

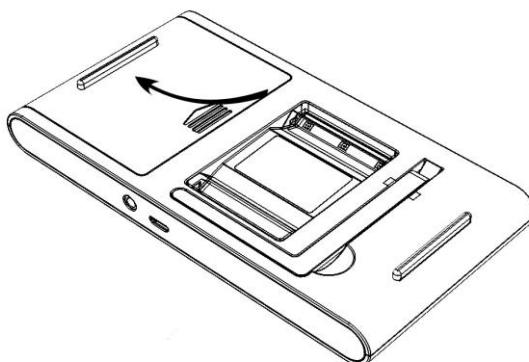

2.


Naciśnij strzałkę na pokrywie baterii i wysuń pokrywę baterii.

3. Włóż baterię we właściwym położeniu do gniazda.

4. Wsuń z powrotem pokrywę baterii.

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczony kabel USB do zasilacza.
2. Podłącz dostarczony kabel USB do micro USB na urządzeniu.
3. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego i rozpocznij ładowanie.

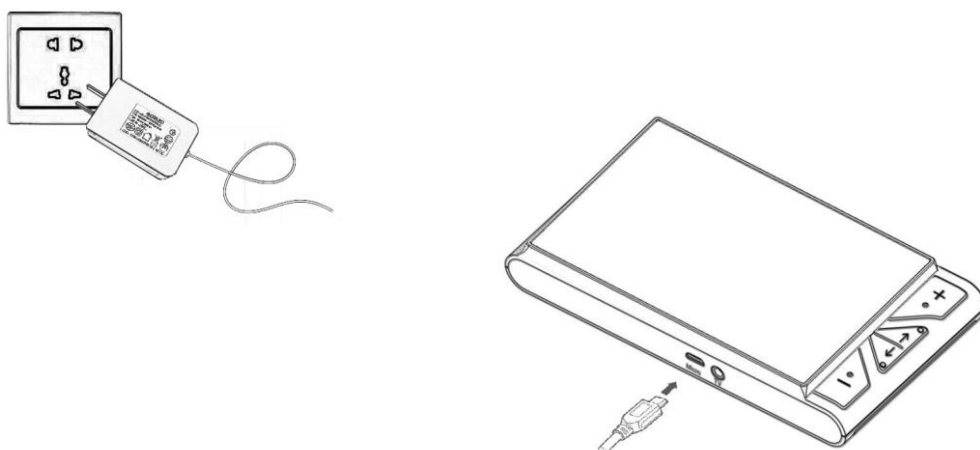


Stan wskaźnika ładowania

- Ładuj, gdy urządzenie jest wyłączone. Dioda zasilania będzie świecić na zielono, a następnie automatycznie wyłączy się po pełnym naładowaniu. Pełne ładowanie trwa około 5 godzin i wspiera jednostkę na około 4 godzin ciągłej pracy.
- Gdy urządzenie jest włączone, dioda zasilania będzie świecić się na zielono w przypadku korzystania z zasilacza.
- Gdy urządzenie jest włączone, a zasilacz nie jest podłączony, dioda zasilania będzie świecić na zielono. Gdy bateria jest mocno rozładowana będzie świecić na czerwono. Gdy czerwona dioda zacznie migać, otrzymujemy informację, że trzeba zacząć ładować baterię.
- Można również sprawdzić stan baterii, naciskając przycisk zasilania.

Podstawka do pisania

Otwórz podstawkę do pisania jak na poniższym rysunku. Teraz możesz pisać pod kamerą.

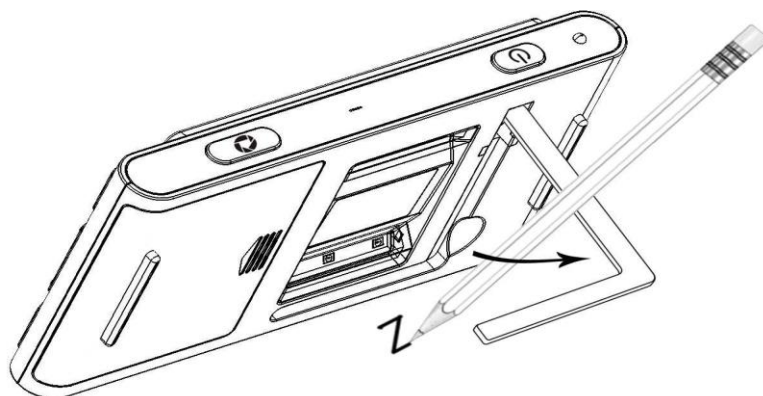

Działanie

Przycisk zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy w celu włączenia urządzenia.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy w celu wyłączenia urządzenia.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić aktualny stan naładowania baterii, tryb koloru, zamrożenia i dźwięku.
- Naciśnij inny przycisk podczas trzymania przycisku zasilania co wywoła funkcję kombi, odnoszącą się do szczegółów instrukcji.

Typ sygnału

- Urządzenie włączone / wyłączone.
- Przycisk sygnału dźwiękowego.
- Sygnał progowy.
- Niski sygnał baterii.

Kontrola sygnału

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zamrażania  przez 3 sekundy w celu wyłączenia / wyłączenia dźwięku.

Powiększenie

- Naciśnij przycisk +, aby powiększyć uchwycony obraz.
- Naciśnij przycisk -, aby pomniejszyć uchwycony obraz.
- Trzymając jednocześnie przycisk + oraz – przez 5 sekund możesz przełączać się między normalnym trybie powiększenia (ustawienie fabryczne) i trybem w stopniu powiększenia.
- Normalny tryb powiększenia: 4x - 20x.
- Rozszerzony tryb powiększenia: 3x - 30x.

Tryb koloru

Tryb koloru jest predefiniowaną kombinacją kolorów. Tryb pełnego koloru nadaje się do oglądania obrazów i map. Natomiast w trybie rozszerzonego kontrastu w połączeniu z różnymi kolorami pierwszego planu i tła, można dokonać wyraźnego odczytu.

- Naciśnij przycisk Tryb koloru  w celu przejścia przez listę dostępnych kombinacji kolorów.

- Naciśnij przycisk Tryb koloru ↑ w celu przejścia przez listę dostępnych kombinacji kolorów.

Przycisk Tryb koloru w „dół” służy do szybkiego przełączania pomiędzy trybem pełnego koloru a trybem rozszerzonym w bieżącym kontraście.

- Przytrzymanie przycisku Tryb koloru ↑ i przycisk Tryb koloru ↓ w tym samym czasie przez 5 sekund, pozwala przełączać się pomiędzy uproszczoną listą kombinacji kolorów a listą kolorów zintegrowaną (ustawienie fabryczne).

Uproszczona lista kombinacji kolorów (6 trybów):

Pełny kolor	Biały na czarnym
Czarny na białym	Żółty na czarnym
Biały na niebieskim	Żółty na niebieskim

Zintegrowana lista kombinacji kolorów (20 trybów):

Pełny kolor	Biały na czarnym
Czarny na białym	Żółty na czarnym
Czarny na żółtym	Biały na niebieskim
Niebieski na białym	Żółty na niebieskim
Niebieski na żółtym	Zielony na czarnym
Czarny na zielonym	Fioletowy na czarnym
Czarny na fioletowym	Niebieski na czarnym
Czarny na niebieskim	Biały na zielonym
Zielony na białym	Biały na czerwonym
Czerwony na białym	Czerwony na czarnym

Jasność

Regulacja jasności wyświetlacza dla trybu kolorowego i pełnego trybu ze wzmocnieniem kontrastowym. Domyślna wartość fabryczna będzie podświetlona na zielono.

- Przycisk zasilania  i przycisk powiększania  powoduje zwiększenie jasności.
- Przycisk zasilania  i przycisk pomniejszania  powoduje zmniejszenie jasności.

Dwa kolory

Regulacja jasności wyświetlacza dla trybu kolorowego i pełnego trybu ze wzmocnieniem kontrastowym w trybie oglądania różnych materiałów. Domyślna wartość fabryczna będą podświetlone na zielono.

- Przycisk zasilania  i przycisk Tryb koloru  powoduje wzmocnienie koloru tła.
- Przycisk zasilania  i przycisk Tryb koloru  powoduje osłabienie koloru tła.

Oświetlenie

- Przycisk zasilania  i przycisk zamrażania  powoduje włączanie / wyłączanie oświetlenia LED.

Zamrażanie

Zamrażanie obrazu na ekranie LCD może być przydatne do dalszego czytania, powiększania, pomniejszania lub zmiany trybu kolorów dla lepszego widoku. Modyfikacja jasności nie jest dozwolona przy zamrażaniu.

- Naciśnij przycisk  aby zablokować aktywny obraz.
- Naciśnij ponownie przycisk  aby odblokować aktywny obraz.
- Aby zmienić powiększenie zablokowanego obrazu, można użyć następującej kombinacji:

Przycisk zasilania  i przycisk Tryb koloru  - przemieszczenie w górę


Przycisk zasilania  i przycisk Tryb koloru  - przemieszczenie w dół

Przycisk zasilania  i przycisk powiększania  - przemieszczenie w lewo

Przycisk zasilania  i przycisk pomniejszania  - przemieszczenie w prawo

Podłączenie TV

Istnieje możliwość podłączenia do telewizora w celu lepszego i większego oglądania uchwyconego obrazu.

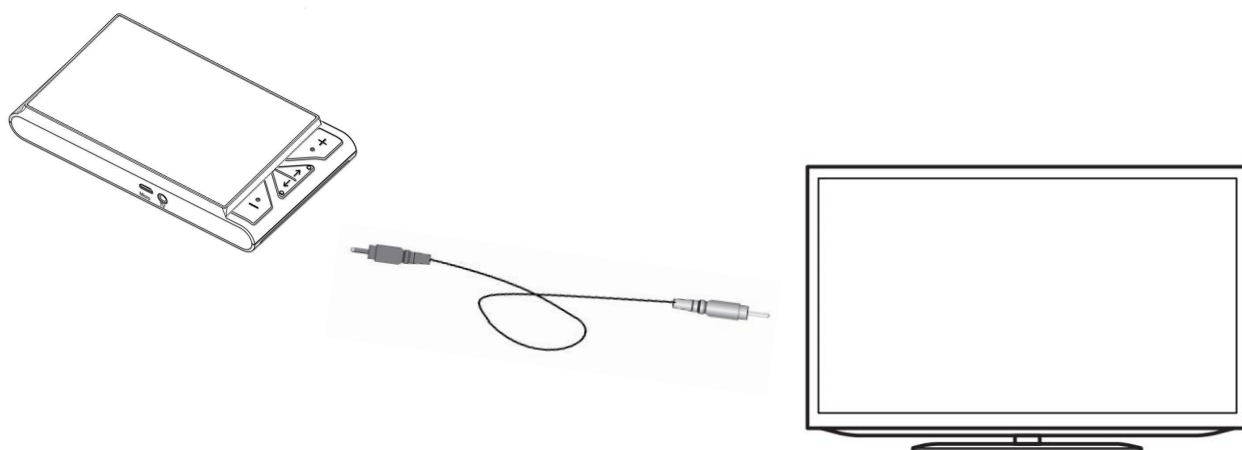

- Po podłączeniu kabla do gniazda TV należy wybrać odpowiedni tryb wyjścia TV (PAL lub NTSC).
- Naciśnij przycisk przycisk powiększania  lub przycisk pomniejszania  w celu wyboru wyjścia PAL lub NTSC, a następnie naciśnij przycisk  aby potwierdzić swój wybór. Teraz obraz zostanie pokazany w telewizji.
- Po odłączeniu kabla telewizyjnego, obraz automatycznie powróci do ekranu LCD jednostki.

Pamięć

Urządzenie będzie automatycznie zapamiętywać ostatnie ustawienia takie jak tryb koloru, powiększenie, sygnał dźwiękowy. Po prawidłowym wyłączeniu i przy ponownym uruchomieniu wykorzysta je automatycznie.

Funkcja oszczędzania energii

Jeśli żadna operacja nie będzie wykonana przez ponad 3 minuty, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

- Przytrzymanie przycisku zamrażania  i przycisku pomniejszania  przez co najmniej 5 sekund powoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie włącza się

- Podłącz do zasilacza
- Naładuj baterię
- Włóż akumulator

Biały / Czarny ekran

- Jeśli urządzenie leży na płaskiej czystej powierzchni, na ekranie mogą pojawić się czarne lub białe elementy.
- Ustaw powiększenie.
- Ustaw tryb koloru.

- Gdy urządzenie jest podłączone do telewizora, ekran jest czarny.
- Ponowne uruchomienie urządzenia.
- Włóż akumulator.

Obraz bez zmian

- Jeśli urządzenie przejdzie w tryb zamrażania, obraz nie ulegnie zmianie.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić aktualny stan.
- Ponowne uruchomienie urządzenia.
- Włóż akumulator.

Smugi / Wypryski na ekranie

- Regulacja jasności.
- Oczyszczyć ekran LCD oraz aparat.

Proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem je śli powyższe problemy nie zostaną rozwiązane.

Specyfikacja

- Wyświetlacz: 5-calowy;
panoramiczny ekran LCD
- Rozmiar: 152 x 80 x 22mm;
- Waga: 200 g (z akumulatorem);
- Tryb koloru: uproszczony 6 trybów;
wbudowane 20 programów;
- Powiększenie: normalne: 4x - 20x;
rozszerzone 3x - 30x;
- Bateria: odłączany akumulator litowo-jonowy;
4 godziny ciągłej pracy;
czas ładowania około 5 godzin;
- Zasilacz: micro USB port;
wejście: 110-240V;
wyjście: 5V / 1A.

 Dystrybutor: ALTIX Sp. z o.o. ul. Modlińska 246C 03- 152 Warszawa tel./fax: 22 510 10 90; Sekretariat: 602 351 100 e-mail: biuro@altix.pl	
--	--

SIGHTA 