

Kapsys MiniVision2 - telefon dla osób niewidomych

Podręcznik Szybki start

Altix Sp. z o. o.

• **MiniVision 2**



Uwaga: Przed użyciem MiniVision2 zalecamy przeczytanie pełnej wersji podręcznika. Wersja elektroniczna tego dokumentu dostępna jest także online na stronie www.kapsys.com w zakładce Support.

Spis treści


Zawartość opakowania.....	3
Wygląd	4
Pierwsze uruchomienie MiniVision2.....	5
Instalowanie karty SIM i baterii.....	5
Ładowanie baterii	8
Włączanie i wyłączanie telefonu	8
Informacje prawne i gwarancja	9

Zawartość opakowania

MiniVision2 jest dostarczany z:



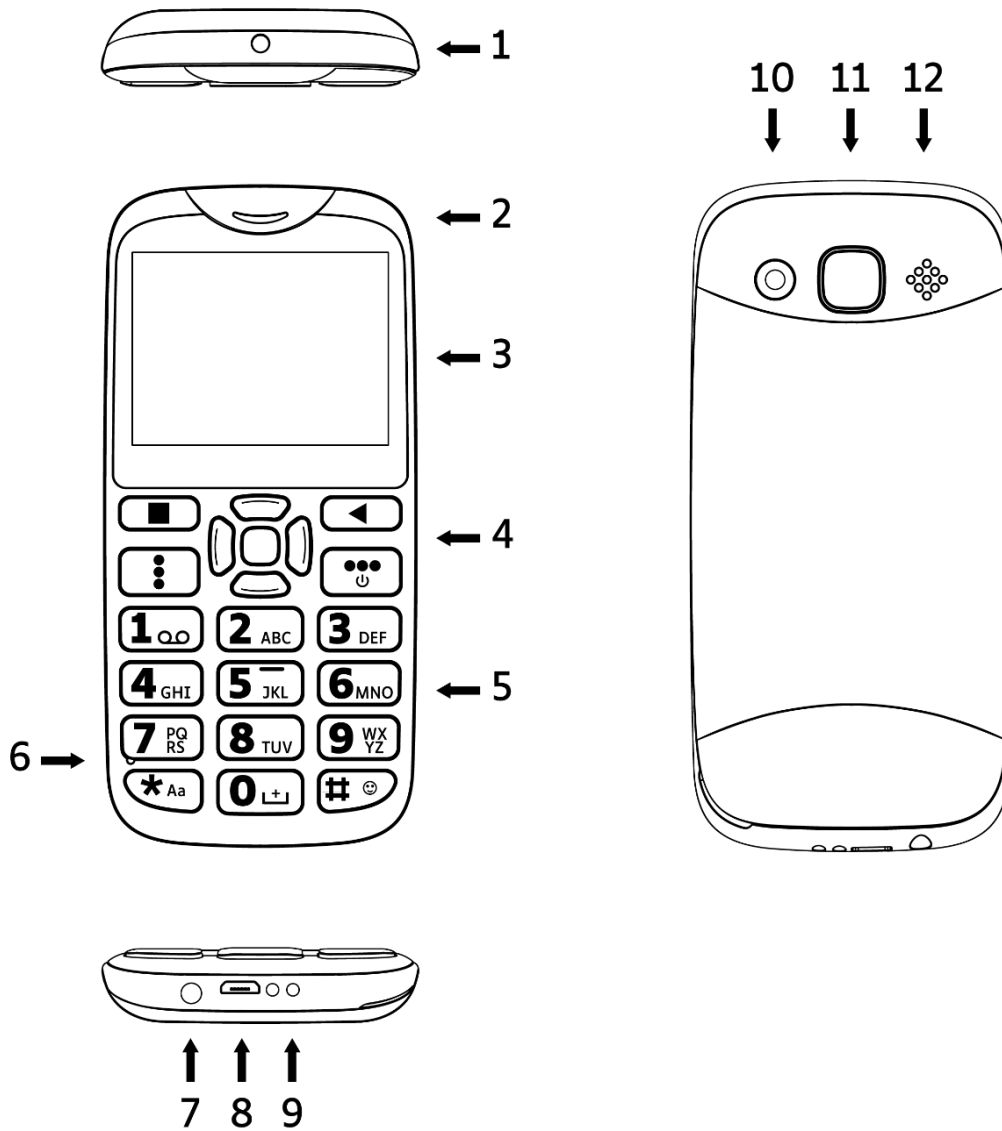

- Akumulatorem
- Ładowarką sieciową USB 220 / 110 V – 5 V
- Kablem mikro USB
- Stereofonicznymi słuchawkami z mikrofonem
- Stacją dokującą do ładowania
- Etui ochronnym
- Podręcznikiem szybki start.



Wygląd







1. Latarka
2. Odbiornik połączeń telefonicznych
3. Ekran telefonu
4. Klawisze sterujące i panel nawigacyjny


 Przycisk w górę - wybiera poprzednią pozycję,

-  Przycisk w dół - wybiera następną pozycję,
-  Przycisk w lewo - redukuje głośność,
-  Przycisk w prawo - zwiększa głośność.
-  Przycisk środkowy "OK" - potwierdza wybraną pozycję. Jego długie wciśnięcie włącza rozpoznawanie mowy.


 Ten przycisk odbiera połączenie lub aktywuje skrót otwierający aplikację «Telefon».



 Ten przycisk kończy połączenie lub aktywuje skrót umożliwiający powrót na ekran początkowy. Jego długie wciśnięcie włącza i wyłącza MiniVision2

 Ten przycisk otwiera menu powiązane z bieżącym ekranem

 Ten przycisk umożliwia przejście do poprzedniego ekranu lub usuwa znak w polu edycyjnym


5. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania znaków
6. Mikrofon do rozmów telefonicznych i rozpoznawania głosu
7. Gniazdo 3,5 mm do podłączenia dołączonych słuchawek
8. Złącze micro USB do ładowania MiniVision2
9. Podkładki kontaktowe do stacji dokującej
10. Kamera
11. Przycisk SOS
12. Głośnik

Pierwsze uruchomienie MiniVision2


Instalowanie karty SIM i baterii

By wykonać tę operację należy:

1. Odwrócić telefon, umieścić paznokieć w wycięciu znajdującym się w lewym dolnym rogu telefonu i unieść tylną obudowę.

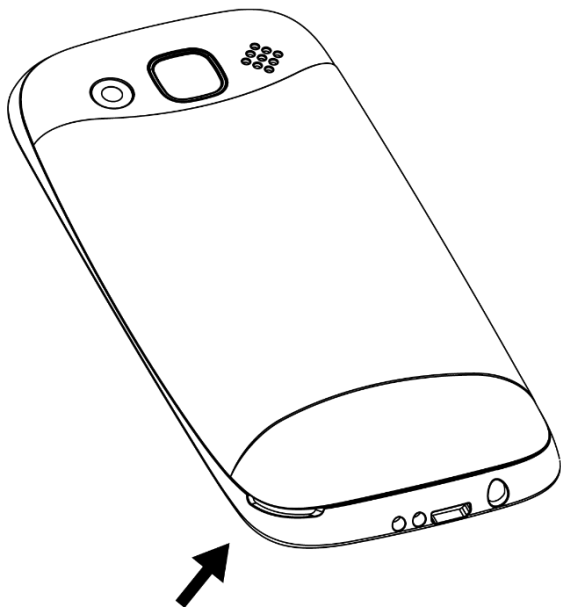


2. Złącze karty SIM znajduje się w lewym, górnym rogu, obok miejsca na kartę, poniżej miejsca na akumulator. Wewnętrzna etykieta informuje o lokalizacji złącza. Należy umieścić kartę SIM w komorze, chip powinien być skierowany w dół, a ścięty róg powinien znajdować się w lewym, dolnym rogu. Lekko wcisnąć kartę SIM czubkiem palca i ostrożnie przesunąć ją do końca w lewo.

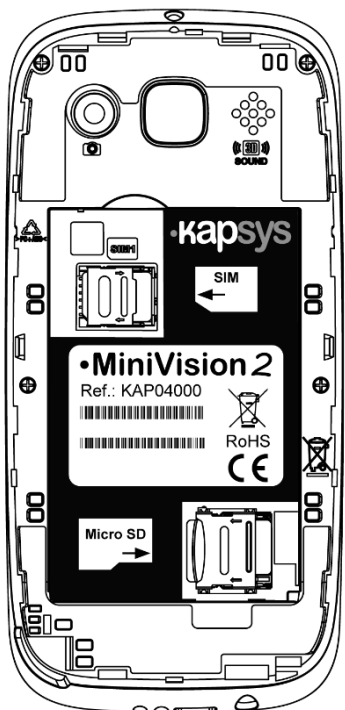

3. Włożyć baterię, umieszczając najpierw jej dolną część, ze stykami w prawym, dolnym rogu, a następnie lekko popchnąć, by wpasowała się na swoje miejsce.



4. Na koniec należy założyć pokrywę, wyrównać jej wypustki z dopasowanymi szczelinami i delikatnie docisnąć pokrywę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

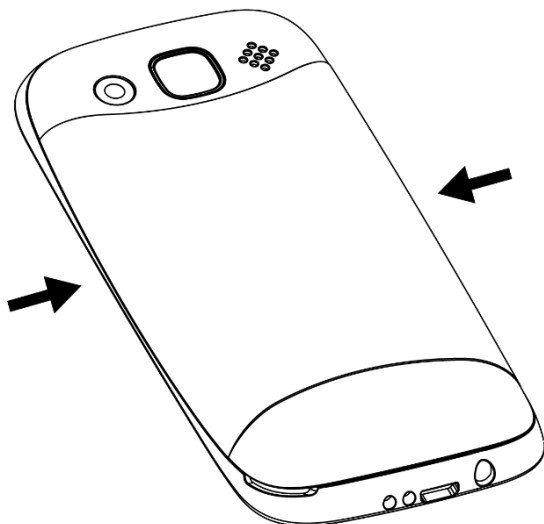

Ładowanie baterii

Przy pierwszym uruchomieniu zaleca się ładowanie baterii przez co najmniej cztery godziny. Następnie można ładować baterię w razie potrzeby. W tym celu należy połączyć USB MiniVision2 kablem z ładowarką sieciową, po czym włączyć ją do dowolnego gniazdka sieciowego i naładować urządzenie. Nagrzewanie się telefonu podczas ładowania lub podczas długiego użytkowania jest zjawiskiem normalnym. Można również ładować MiniVision2 za pośrednictwem stacji dokującej. W tym celu należy podłączyć kabel USB między stacją dokującą a ładowarką sieciową. Następnie włączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego i umieścić MiniVision2 w podstawie. Gdy telefon jest włączony, rozlega się sygnał dźwiękowy, informujący o prawidłowym ładowaniu telefonu. Uwaga: etui ochronne nie jest kompatybilne ze stacją dokującą.

Włączanie i wyłączanie telefonu

MiniVision2 włącza się długo wciskając klawisz kończenia połączenia. MiniVision2 zawibruje po pomyślnym włączeniu. Telefon jest gotowy do użycia, gdy wyświetli się ekran główny. Kiedy MiniVision2 jest włączony,

krótkie wciśnięcie klawisza kończenia połączenia ●●●, przełącza telefon w tryb gotowości (wyłączony ekran) lub w tryb pracy (ekran włączony). Tryb gotowości jest aktywowany po ustalonym okresie bezczynności, by oszczędzać energię baterii. W trybie gotowości ekran MiniVision2 jest wyłączony, ale nadal można odbierać połączenia przychodzące i wiadomości. By wyłączyć MiniVision2, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk kończenia połączenia ●●●, następnie wcisnąć przycisk „OK”, by potwierdzić wyłączenie. MiniVision2 zawibruje po pomyślnym wyłączeniu. Jeśli telefon się nie włącza, należy sprawdzić czy bateria została prawidłowo zainstalowana i naładowana, jeśli nie, należy powtórzyć procedurę jej instalacji.

Informacje prawne i gwarancja

1. Bezpieczne używanie i rekomendacje
 - Prosimy ostrożnie obchodzić się z urządzeniem MiniVision2 i jego akcesoriami, chronić je przed upuszczeniem i uderzeniami.
 - Prosimy nie demontować urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
 - Do czyszczenia prosimy używać tylko miękkich materiałów. Nie należy używać chemikaliów, detergentów lub produktów ściernych.
 - Urządzenie to nie jest wodoodporne. Należy je chronić przed wilgocią i zachlapaniem cieczami.
 - Prosimy nigdy nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i unikać jego przechowywania w miejscach gorących, wilgotnych lub narażonych na działanie korozji.
 - Nie korzystać z urządzenia w pobliżu miejsc narażonych na działanie pola magnetycznego.
 - Nie korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest uszkodzony lub pęknięty, ponieważ może to spowodować skaleczenia.
 - Nie należy korzystać z urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem.
 - Nie można ładować urządzenia w temperaturach poniżej 0 ° C (32 ° F) lub powyżej 45 ° C (113 ° F).
 - Nie należy korzystać z urządzenia w placówkach opieki zdrowotnej. Przed skorzystaniem z telefonu w pobliżu sprzętu medycznego, trzeba poprosić personel placówki o zgodę.
 - Prosimy nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur. (1) Zakres temperatury roboczej wynosi od -10°C (14°F) do +55°C (131°F); (2) temperatura krótkotrwałego przechowywania wynosi od -20°C (-4°F)

do +60°C (140°F); (3) temperatura długotrwałego przechowywania wynosi od -10°C (14°F) do +25°C (77°F)

- Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. W celu wydłużenia czasu jej pracy należy zawsze wykonywać pełne ładowanie.
- Długotrwałe korzystanie z urządzenia może skutkować jego nagrzewaniem się.
- W celu zachowania optymalnej wydajności urządzenia zalecane jest jego okresowe wyłączenie i wyjmowanie baterii.

2. Zdrowie i bezpieczeństwo

- Urządzenie należy przechowywać z dala od małych dzieci.
- W celu ochrony słuchu należy unikać długotrwałej pracy z wysokim poziomem głośności podczas korzystania ze słuchawek, głośników lub odbiornika.
- Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca powinny zasięgnąć porady lekarza lub producenta rozrusznika serca w zakresie jego kompatybilności z urządzeniem bezprzewodowym.
- Jeśli urządzenia transmitujące fale radiowe nie są odpowiednio zabezpieczone, mogą zakłócać bezpieczne i skuteczne korzystanie z niektórych urządzeń medycznych.

3. Gwarancja

- W przypadku awarii urządzenia prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Gwarancji nie udziela się na urządzenie, niezależnie od napotkanej usterki, w następujących przypadkach:
 - Normalnego zużycia urządzenia oraz zmniejszenia pojemności akumulatora.
 - Uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, wystawienia na działanie wilgoci lub cieczy, a także na działanie źródeł ciepła.
 - Pęknięć lub uszkodzeń urządzenia powstałych w wyniku ewidentnego upadku.
 - Nieprzestrzegania zasad ostrożności, wypadków, zaniedbań, niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami dołączonymi do urządzenia, lub komercyjnego wykorzystania urządzenia.
 - Zwarcia baterii lub użycia baterii w innym urządzeniu niż MiniVision2.
 - Używania akcesoriów lub złączy innych niż dostarczone przez producenta.

- Uszkodzeń wynikających z próby naprawy dokonanej przez podmiot inny niż producent lub autoryzowany punkt naprawy.
- Zalecane jest wykonanie przynajmniej jednej kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci urządzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z powodu awarii, naprawy lub wymiany urządzenia.
- Jakiegolwiek awarie związane z usługami sieciowymi lub z systemem komórkowym nie podlegają gwarancji. By uzyskać pomoc w tej kwestii, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorem sieci telefonicznej lub dostawcą usług internetowych.

4. Informacje na temat poziomu absorpcji energii

- MiniVision2 jest wyposażony w nadajnik / odbiornik radiowy. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zalecanymi przez Unię Europejską progami ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF). Urządzenie to spełnia wymagania UE (1999 / 519 / WE) dotyczące ograniczenia narażenia ogółu społeczeństwa na działanie pola elektromagnetycznego. Jednostką miary limitu zalecanego przez Radę Europejską dla telefonów komórkowych jest "współczynnik absorpcji swoistej" (SAR). Limit SAR uśredniony dla 10 g tkanki ciała wynosi 2,0 W / kg. Urządzenie to spełnia wymagania Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz norm europejskich EN 62209-1 / EN 62209-2 / NF EN 50566 dla mobilnych urządzeń radiowych. W odniesieniu do akcesoriów noszonych na sobie telefon ten został przetestowany do korzystania z akcesoriami, które nie zawierają metalu i których słuchawka jest umieszczana w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. Korzystanie z innych akcesoriów może nie zapewniać zgodności z normą ekspozycji na fale radiowe. Jeśli nie korzysta się z akcesorium do noszenia na sobie i nie trzyma się telefonu przy uchu, w przypadku, gdy telefon jest włączony należy umieścić go w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. Podczas użytkowania urządzenia rzeczywisty poziom SAR jest zazwyczaj znacznie niższy niż wartość maksymalna. Generalnie, im bliżej stacji bazowej, tym niższa moc wyjściowa telefonu komórkowego. W celu zredukowania ekspozycji na energię fal radiowych, należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub innej podobnej opcji, pozwalającej trzymać urządzenie z dala od głowy i ciała. Poniżej wymieniono najwyższe wartości SAR:

- Głowa: 1,77 W/kg (średnio na 10 g tkanki ciała)
- Tułów: 1,85 W/kg (średnio na 10 g tkanki ciała)

- Kończyny: 3,02 W/kg (średnio na 10 g tkanki ciała)
5. Obsługa klienta
- W celu uzyskania wsparcia technicznego prosimy o kontakt z serwisem firmy ALTIX pod numerem tel. 41 343 80 00 lub na adres email: serwis@altix.pl
 - Obsługa klientów KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 Mougins Sophia Antipolis, Francja. Antipolis, France. Można także odwiedzić stronę internetową: www.kapsys.com.
6. Znaki towarowe, firmy i marki produktów, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz w innych podręcznikach użytkownika KAPSYS, są znakami towarowymi, zarejestrowanymi lub nie i stanowią własność odpowiednich właścicieli, jak opisano poniżej: Nazwy Kapsys, marki i loga firmy są zarejestrowanymi znakami towarowymi Kapsys SAS. Nazwy, marki i loga bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc. Nuance jest zarejestrowanym znakiem towarowym Nuance Corporation Inc. Wszystkie nazwy marek i produktów są nazwami handlowymi odpowiednich firm lub ich zarejestrowanymi nazwami.
7. O tym dokumencie
- Informacje opublikowane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. KAPSYS zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu bez obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu. Firma Kapsys nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne lub pominięcia w niniejszym dokumencie ani w sytuacji szkody przypadkowej, ani pośredniej, ani też szkody wynikłej z eksploatacji produktu lub korzystania z tego dokumentu. KAPSYS dokłada wszelkich starań, by stale ulepszać produkowane urządzenie oraz jakość i wydajność jego funkcji. W związku z tym firma Kapsys zaprasza na stronę internetową (www.kapsys.com), w celu uzyskania najnowszej aktualizacji dotyczącej użytkowania i działania urządzenia MiniVision2.
 - Zgodność z RoHS: Urządzenie to jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/65 / UE z dnia 8 czerwca 2011 r., wraz ze zmianami, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).
 - Dyrektywa WEEE: Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywą europejską 2002 / 96 / WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE),

produkt elektryczny nie może być w żadnych okolicznościach wyrzucany do nieposortowanych odpadów komunalnych. Produkt ten należy zutylizować, zwracając go do punktu sprzedaży lub do lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu jego recydingu.

- Oznakowanie CE: Produkt ten jest zgodny z wymogami dotyczącymi oznakowania CE produktów przeznaczonych do użytku w domach mieszkalnych, instalacji w placówkach komercyjnych oraz w przemyśle lekkim i spełnia wymagania dyrektywy R & TTE (1999 /5/ WE). Więcej informacji na temat oznakowania CE można znaleźć na stronie internetowej www.kapsys.com.
- Ostrzeżenie: Ustawiona na wysokim poziomie głośność słuchawek może spowodować trwałe uszkodzenie narządu słuchu.