

Krzesło ewakuacyjne EV-2000

Instrukcja obsługi

Altix Sp. z o. o.



SAFETY CHAIR

Safety Chair - Ekspert w dziedzinie bezpiecznej ewakuacji.

Producent Safety Chair 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania

Dystrybutor Altix Sp. z o. o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa, tel.: 22 510 10 90

<http://sklep.altix.pl/pl/ev-2000-krzeslo-ewakuacyjne>

Spis treści

Cechy użytkowe krzesła ewakuacyjnego EV-2000	2
Rozkładanie krzesła ewakuacyjnego EV-2000	3
Transport pasażera	4
Składanie krzesła ewakuacyjnego EV-2000.....	5
Montaż na ścianie krzesła ewakuacyjnego EV-2000	6
Informacje o bezpieczeństwie obsługi krzesła ewakuacyjnego EV-2000	7
Zalecenie i ostrzeżenie.....	7

Cechy użytkowe krzesła ewakuacyjnego EV-2000




Rys. Prezentacja złożonego i rozłożonego krzesła ewakuacyjnego EV-2000 z rysunkiem wagi, która symbolizuje jego udźwieg wynoszący 159 kg.

1. Lekka aluminiowa rama korpusu. Solidna aluminiowa konstrukcja świetnie nadająca się do wielokrotnego użytku.

2. Automatyczny mechanizm blokujący. Krzesło automatycznie blokuje się na miejscu, gdy jest rozłożone.
3. Przednie kółka z hamulcem, przydatne w sytuacji, gdy krzesło wymaga unieruchomienia.
4. Teleskopowe podłokietniki dla osób transportowanych, dla zwiększenia ich komfortu.
5. Podnóżek dla osób transportowanych umożliwiający wygodne oparcie stóp.
6. Pasy bezpieczeństwa dla osób transportowanych ograniczające ruch i zwiększające komfort.
7. Łatwe do czyszczenia siedzenia winylowe odporne na plamy krwi i płynów ustrojowych.
8. Łatwe składanie do montażu na ścianie lub wygodnego przechowywania w miejscach, gdzie należy zachować dużo wolnej przestrzeni.

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga	Udźwig
109 cm	48,8 cm	25 cm	7,5 kg	159 kg


Rozkładanie krzesła ewakuacyjnego EV-2000

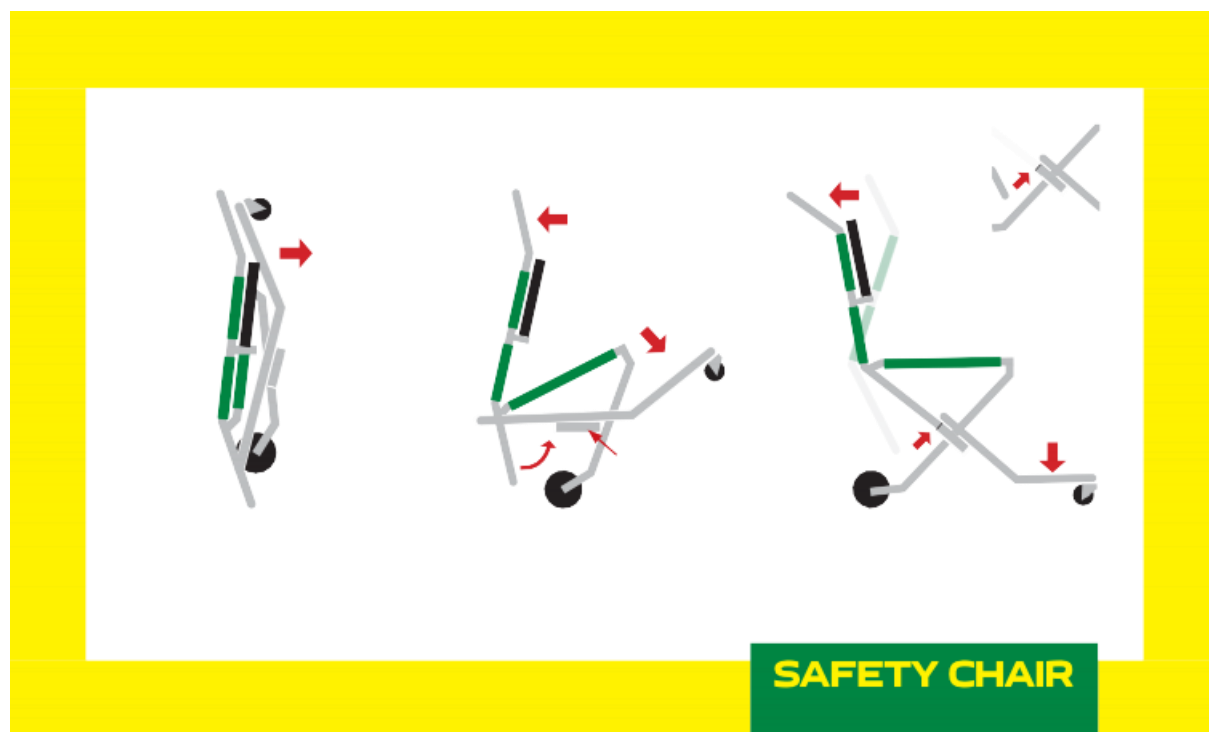

Rys. Prezentacja kolejnych etapów rozkładania krzesła ewakuacyjnego EV-2000.

1. Odciągnij podnóżek od uchwyty, w kierunku wskazanym czerwoną, poziomą strzałką na pierwszym, powyższym rysunku, by rozpocząć rozkładanie krzesła.
2. Trzymając nadal za uchwyt krzesła, wskazany na drugim rysunku pierwszą, poziomą, czerwoną strzałką. Opuść podnóżek na podłogę, w kierunku wskazanym drugą, ukośną, czerwoną strzałką na tym samym rysunku, zbliżając tył ramy do kołnierza blokującego, co wskazują dwie cienkie strzałki na dole rysunku.
3. Umieść jedną stopę na podnóżku, który wskazany jest na trzecim rysunku czerwoną, pionową strzałką na dole, a następnie energicznie popchnij oparcie do tyłu, co wskazuje górna, pozioma strzałka na rysunku, by zablokować ramę w kołnierzu blokującym, który wskazuje trzecia, ukośna strzałka.

Transport pasażera

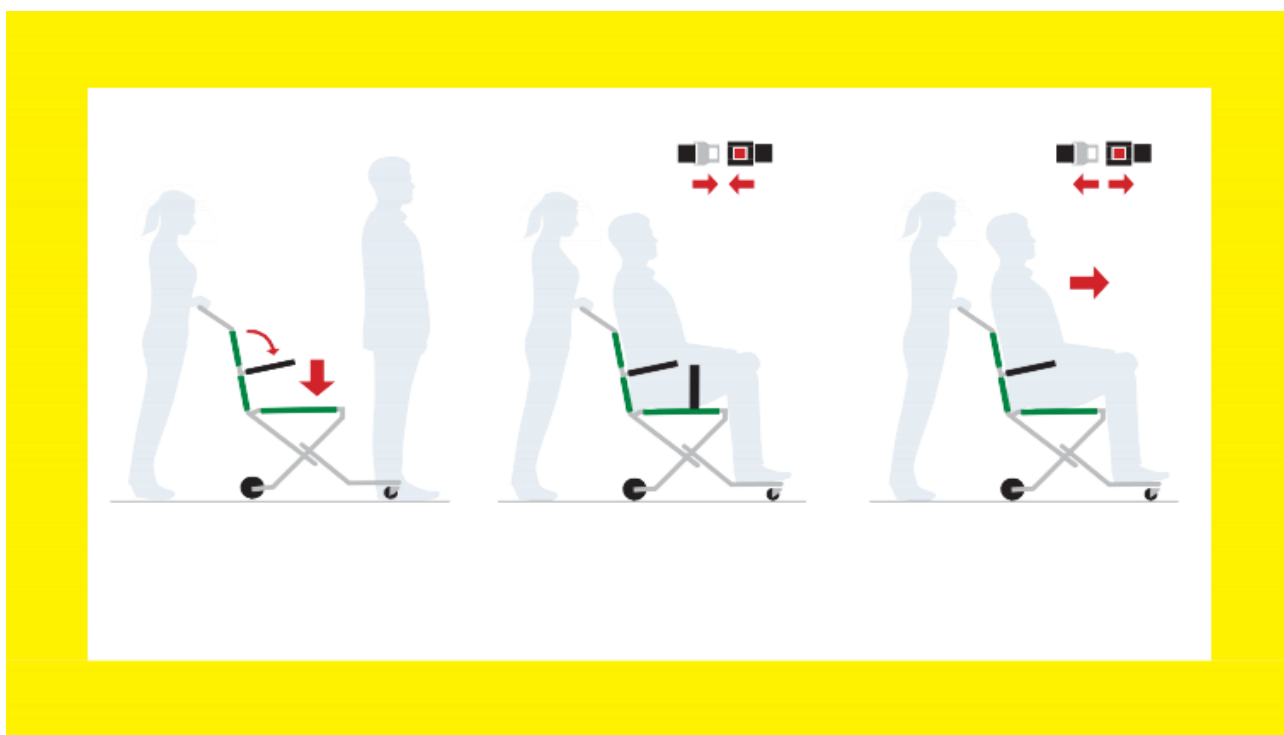

Rys. Prezentacja kolejnych etapów przygotowania pasażera do transportu na krześle ewakuacyjnym EV-2000 i czynności kończących transport.

1. Po rozłożeniu krzesła rozłóż podłokietniki w sposób wskazany na pierwszym, powyższym rysunku przez cieką, czerwoną, łukowatą strzałkę. Posadź osobę

transportowaną w sposób pokazany przez drugą, pionową strzałkę na tym samym rysunku.

2. Gdy osoba transportowana usiądzie, opierając stopy na podnóżkach, zapnij biodrowe pasy bezpieczeństwa w sposób wskazany na drugim rysunku przez dwie strzałki z grotami skierowanymi ku sobie.
3. Osoba transportowana może być teraz bezpiecznie przewieziona do miejsca docelowego. Po dotarciu do miejsca docelowego osoba transportowana może opuścić krzesło, po uprzednim rozpięciu pasów bezpieczeństwa, w sposób wskazany na trzecim rysunku przez dwie strzałki z grotami skierowanymi na zewnątrz.

Uwaga: Transport za pomocą krzesła ewakuacyjnego EV-2000 może się odbywać wyłącznie po powierzchniach poziomych, płaskich np. na klatkach schodowych, w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

Składanie krzesła ewakuacyjnego EV-2000




Rys. Prezentacja kolejnych etapów składania krzesła ewakuacyjnego EV-2000.

1. Zamknij krzesło ewakuacyjne, zwalniając ramę z kołnierza blokującego, poprzez naciśnięcie stopą centralnego drążka zwalniającego, trzymając jednocześnie uchwyt

krzesła w sposób pokazany na pierwszym, powyższym rysunku, przez dwie pionowe, czerwone strzałki.

2. Podnieś podnóżek do góry, by zetknął się z uchwytem krzesła w sposób pokazany na drugim rysunku przez trzy, czerwone strzałki.
3. Złożone krzesło zaprezentowane jest na trzecim rysunku. Pas biodrowy można teraz poprowadzić wokół ramy krzesła i zapiąć w sposób wskazany na tym samym rysunku przez dwie strzałki z grotami skierowanymi ku sobie.

Montaż na ścianie krzesła ewakuacyjnego EV-2000

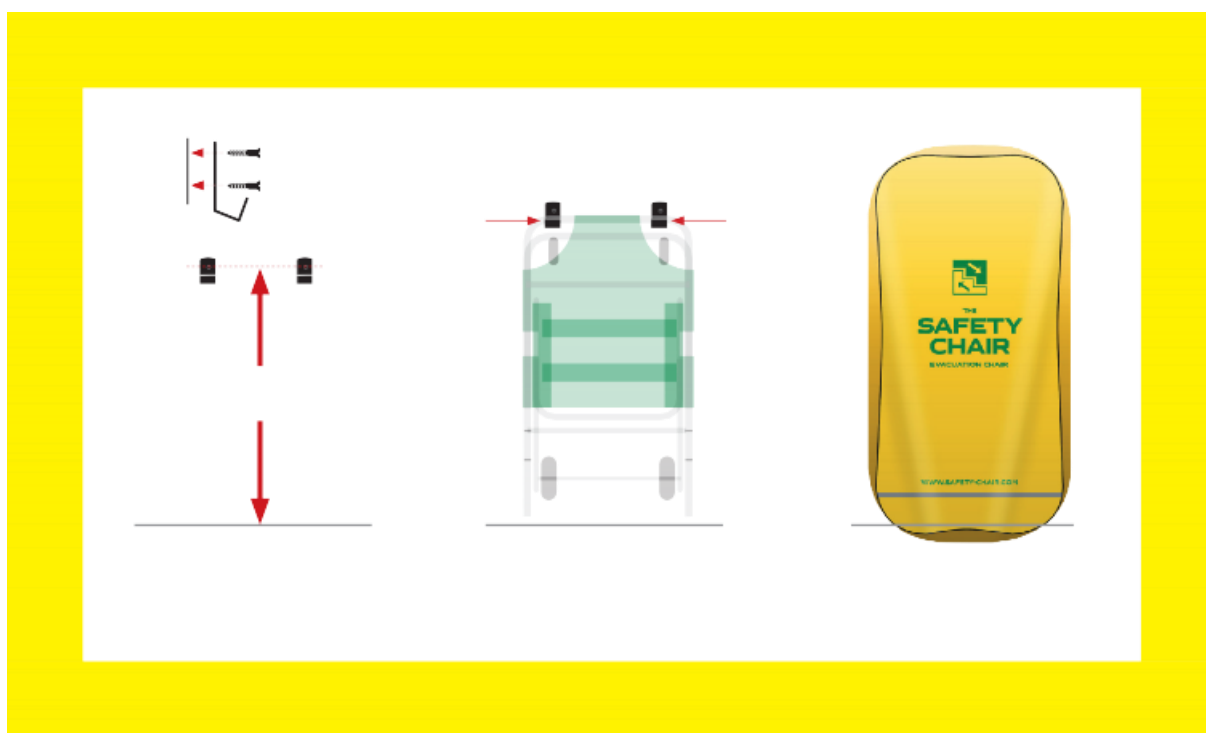

Rys. Prezentacja sposobu montażu krzesła ewakuacyjnego EV-2000 na hakach umieszczonych na ścianie.

1. Jeśli krzesło będzie przechowywane na hakach ściennych, przymocuj haki na ścianie, na wysokości 115 centymetrów za pomocą śrub znajdujących się w zestawie w sposób pokazany na pierwszym, powyższym rysunku.
2. Po zamocowaniu haków ściennych krzesło powieś na nich za uchwyt, jak pokazano na drugim rysunku.

3. Na umieszczone na hakach krzesło ewakuacyjne EV-2000 nałożyć pokrowiec ochronny w sposób zaprezentowany na trzecim rysunku.

Informacje o bezpieczeństwie obsługi krzesła ewakuacyjnego EV-2000

Zalecamy, by krzesło ewakuacyjne EV-2000 obsługiwał wyłącznie certyfikowany, przeszkolony personel. Nieprzeszkolony personel może spowodować obrażenia u osoby transportowanej lub uszkodzenia krzesła.

Krzesło ewakuacyjne EV-2000 może być używane wyłącznie w celu opisanym w niniejszej instrukcji, czyli po powierzchniach poziomych, płaskich, np. na klatkach schodowych, w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia u osoby transportowanej lub uszkodzenia krzesła.

Krzesło ewakuacyjne EV-2000 należy obsługiwać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

Do zabezpieczenia osoby transportowanej należy zawsze używać dostarczonych pasów bezpieczeństwa. Niezabezpieczona osoba transportowana może spaść z krzesła, doznając obrażeń ciała.

- W miarę możliwości należy starać się korzystać z pomocy personelu, który został przeszkolony jak obchodzić się z krzesłem. Należy zawsze zachować kontrolę nad krzesłem, kierując jednocześnie wszystkimi pomocnikami.
- Serwisowanie może być przeprowadzane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel. Nieprawidłowa konserwacja może spowodować uszkodzenie krzesła i ewentualne obrażenia osób transportowanych.
- Nie należy pozostawiać osoby transportowanej na krześle bez opieki, może to bowiem spowodować u niej obrażenia.
- Przymocowanie do krzesła nieodpowiednich przedmiotów może stanowić zagrożenie dla osoby transportowanej.
- Do obsługi krzesła należy używać wyłącznie części zatwierdzonych przez Safety Chair. Niewłaściwe części mogą spowodować obrażenia u osoby transportowanej.
- Krzesło EV-2000 zostało zaprojektowane do celów wyszczególnionych w niniejszej instrukcji obsługi. Modyfikacja krzesła może spowodować obrażenia u osoby transportowanej.

Zalecenie i ostrzeżenie

Zalecamy, by szkolenie z używania krzesła ewakuacyjnego odbywało się regularnie, najlepiej podczas ćwiczeń przeciwpożarowych. W celu uzyskania wytycznych lub przeprowadzenia szkolenia należy skontaktować się ze sprzedawcą – Altix Sp. z o. o. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania krzesła.

Producent Safety Chair 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania
Dystrybutor Altix Sp. z o. o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa, tel.: 22 510 10 90
<http://sklep.altix.pl/pl/ev-2000-krzeslo-ewakuacyjne>