

Mata ewakuacyjna ULTI-MAT

Podręcznik użytkownika

Altix Sp. z o. o.



SAFETY CHAIR

Producent Safety Chair 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania

Dystrybutor Altix Sp. z o. o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa, tel.: 22 510 10 90

<http://sklep.altix.pl/pl/ulti-mat-mata-bezpieczenstwa-ewakuacyjna>

Istotne uwagi:

- Podczas używania maty ewakuacyjnej ULTI-MAT należy unikać gwałtownych jej ruchów, by uniknąć niepożądanych obrażeń osoby transportowanej,
- W mało prawdopodobnym przypadku wadliwego działania ULTI-MAT podczas użytkowania, należy natychmiast zaprzestać używania maty ewakuacyjnej ULTI-MAT.

Spis treści

Specyfikacja.....	2
Zawartość zestawu	2
Wskazówki ogólne.....	2
Przeznaczenie i wygląd maty ewakuacyjnej	3
Kwalifikacje operatora maty.....	4
Instrukcja użycia ULTI-MAT	4
Czynności wstępne	4
Obsługa ULTI-MAT	4
Konservacja.....	5

Przechowywanie i serwisowanie	5
Ogólne ostrzeżenia, środki ostrożności i ograniczenia	5

Specyfikacja

Opis	Mata standardowa	Mata bariatryczna (dla osób o większej wadze)
Kod produktu	ULTI-MAT-S	ULTI-MAT-B
Kolor	Czerwony	Czerwony
Waga	1,9 kg	3,2 kg
Wymiary maty złożonej	22 x 54 x 24 cm	35 x 76 x 33 cm
Wymiary maty rozłożonej	200 x 120 x 2,54 cm	200 x 177 x 3,8 cm
Przetestowana dla wagi	680 kg	680 kg
Bezpieczne obciążenie robocze	300 kg	450 kg
Przechowywanie	Dedykowany pokrowiec dołączony do zestawu	
Ognioodporność	Materiał niepalny	

Zawartość zestawu

- Mata ewakuacyjna ULTI-MAT w pokrowcu do przechowywania.

Wskazówki ogólne

Należy dokładnie przeczytać i przyswoić zalecenia znajdujące się w niniejszym podręczniku użytkownika. Wszelkie procedury używania i konserwacji maty niezgodne z podręcznikiem

będą wykonywane na własne ryzyko i odpowiedzialność operatora, a ULTI-MAT nie będzie ponosić odpowiedzialności za obrażenia ciała osoby transportowanej lub uszkodzenia maty.

Poza informacjami zawartymi w niniejszym podręczniku, operatorzy powinni używać maty uwzględniając obowiązujące przepisy, wytyczne i zasady międzynarodowe, krajowe i lokalne. Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie tego produktu leży wyłącznie w gestii operatorów. Jeśli podczas użytkowania zdarzy się poważny incydent, należy to zgłosić, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na początku i na końcu podręcznika.



Przeznaczenie i wygląd maty ewakuacyjnej

ULTI-MAT to maty ewakuacyjne przeznaczone do bezpiecznego transportu osób nie mogących poruszać się samodzielnie. Służą do ewakuacji z budynków, w sytuacjach zagrożenia. Maty powinny być obsługiwane przez dwie osoby. Po odpowiedniej ocenie ryzyka, dozwolona jest obsługa maty także przez jedną osobę. ULTI-MAT umożliwiają swobodne manewrowanie matą z osobą znajdującą się na niej w pozycji leżącej i odpowiednio zabezpieczoną.

ULTI-MAT składa się z jednoczęściowej taśmy tapicerskiej o wysokiej wytrzymałości, biegnącej przez całą długość maty, osłaniającej zarówno głowę, jak i nogi osoby transportowanej. Mata jest wyposażona w dwa regulowane pasy do mocowania zarówno wysokich, jak i niskich osób. Osobny pas zabezpiecza nogi. Po umieszczeniu osoby transportowanej na macie ewakuacyjnej, dla większego bezpieczeństwa można ją dodatkowo owinąć osłonami znajdującymi się po obu stronach maty, a następnie zabezpieczyć taśmą ze sprzączkami i odciągnąć w bezpieczne miejsce za pomocą pasów znajdujących się obok głowy i stóp osoby transportowanej.

Przy podstawie maty znajdują się cztery uchwyty w żółtym, kontrastowym kolorze, służące do przenoszenia maty. ULTI-MAT można zwinąć i umieścić w dedykowanym pokrowcu znajdującym się w zestawie lub na stojaku z pokrowcem, co zapewnia wygodne i kompaktowe przechowywanie maty.

Kwalifikacje operatora maty

Maty ULTI-MAT powinny być obsługiwane przez dwóch operatorów. Po odpowiedniej ocenie ryzyka, dozwolona jest obsługa także przez jedną osobę. Urządzenie ULTI-MAT jest przeznaczone do użytku przez odpowiednio przeszkolonych i kompetentnych operatorów i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, określonym w niniejszym podręczniku. Poza stosowaniem się do wytycznych zawartych w tym podręczniku, operatorzy powinni uwzględniać obowiązujące przepisy, wytyczne i zasady międzynarodowe, krajowe i lokalne dotyczące tego typu transportu.

Instrukcja użycia ULTI-MAT

Czynności wstępne

Na wstępie należy usunąć wszystkie opakowania ULTI-MAT i przeprowadzić kontrolę wzrokową w celu upewnienia się, że:

- Zawartość opakowania jest kompletna,
- mata ULTI-MAT nie została uszkodzona podczas transportu,
- wszystkie elementy wyposażenia działają poprawnie.

Obsługa ULTI-MAT

- Na początek należy pociągnąć żółte pasy z rzepami, by wyjąć ULTI-MAT z pokrowca,
- rozłożyć matę płasko na podłodze, klamrami do góry,
- odpiąć klamry, położyć pasy i klamry obok maty,

- przenieść osobę transportowaną na matę,
- upewnić się, że stopy osoby transportowanej są bezpiecznie ułożone w kieszeni na stopy,
- w razie potrzeby owinąć osobę transportowaną kocem,
- zacisnąć z wycuciem pasy zabezpieczające nad osobą transportowaną,
- używając pętli do ciągnięcia maty, operatorzy mogą bezpiecznie manewrować matą z umocowaną na niej osobą transportowaną,
- w przypadku schodzenia po schodach należy się upewnić czy głowa osoby transportowanej znajduje się w górnej części maty, a jej stopy ułożone są w dolnej części maty, a także czy operatorzy mają pełną kontrolę nad bezpiecznym ruchem maty.

Konserwacja

ULTI-MAT jest produktem wielokrotnego użytku, dlatego należy wykonać poniższe czynności, by umożliwić ponowne użycie maty ewakuacyjnej.

- Dokonać oględzin maty. Po użyciu ULTI-MAT należy sprawdzić czy stan maty jest dobry, czy nie nosi ona śladów zniszczenia materiału lub innych uszkodzeń. W przypadku zauważenia uszkodzeń, matę należy zutylizować, nie może ona być ponownie użyta.
- Jeśli mata jest w dobrym stanie, należy ją wyczyścić, następnie złożyć ją i umieścić w pokrowcu, w celu bezpiecznego przechowywania.
- ULTI-MAT można czyścić wyłącznie łagodnym detergentem, nie należy prać maty w pralce ani suszyć w suszarce.

Przechowywanie i serwisowanie

Mata powinna być przechowywana w dołączonym do zestawu pokrowcu i w stojaku z kieszenią montowanym na ścianie, w celu zapewnienia łatwego dostępu do niej w sytuacji awaryjnej. ULTI-MAT należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń materiału lub też innych uszkodzeń, powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedozwolonych prób naruszenia konstrukcji urządzenia. Jeśli po oględzinach maty stwierdzi się, że nie nadaje się ona do dalszej eksploatacji, należy bezpiecznie ją zutylizować.

Ogólne ostrzeżenia, środki ostrożności i ograniczenia

- Tylko przeszkoleni i kompetentni operatorzy mogą obsługiwać ULTI-MAT,
- mata może być użytkowana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem,
- nie należy przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia maty, wynoszącego 680 kg,
- bezpieczne obciążenie robocze maty standardowej wynosi 300 kg, zaś maty bariatrycznej - 450 kg,
- nie należy pozostawiać osoby transportowanej w ULTI-MAT bez nadzoru operatorów,
- operatorzy powinni mieć zawsze pełną kontrolę nad matą podczas jej obsługi,
- operatorom nie wolno puszczać maty swobodnie podczas transportu osoby.

Producent Safety Chair 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania

Dystrybutor Altix Sp. z o. o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa, tel.: 22 510 10 90

<http://sklep.altix.pl/pl/ulti-mat-mata-bezpieczenstwa-ewakuacyjna>

Wersja 2 podręcznika, październik 2020.